

**Anwendungshinweise:**

ERLAU Vorrüstsets sind für die Anwendung in geschlossenen Räumen, z.B. Badezimmern, bestimmt. Das Vorrüstset dient zur Vorrüstung von Stützgriffen und Duschsitzen, damit diese zu einem späteren Zeitpunkt mit geringem Montageaufwand angebracht werden können.

**Warnhinweise:**

Die Erlau Vorrüstsets sind für eine maximale statische Gebrauchslast von 150kg ausgelegt. Bei Überschreitung der Last können dauerhafte Schäden am Vorrüstset oder an dem daran befestigten Produkt auftreten. Im Falle einer Lastüberschreitung muss das Vorrüstset und das daran befestigte Produkt unbedingt vor Weiterverwendung von einem Fachunternehmen geprüft werden.

Die einwandfreie und sichere Funktion des Erlau Vorrüstsets hängt im wesentlichen von der fachgerechten Montage ab. Die Vorrüstsets dürfen aus diesem Grund nur von kundigem Fachpersonal (Sanitärinstallateur) montiert werden. Eine nicht fachgerechte Montage kann zu schwerwiegenden Funktionsbeeinträchtigungen führen. Von einer Selbstmontage ist daher dringend abzuraten.

Verwenden Sie die Erlau Vorrüstsets nur in ihrer vorgesehenen Funktion. Zweckentfremdungen wie z.B. die Verwendung zur Anbringung von Fremdprodukten sind nicht zulässig.

Durch Überlastung, falsche Montage oder Zweckentfremdung kann es zu Unfällen kommen, die schwere Verletzungen zur Folge haben können.

Die Gewährleistung für Schäden, die aus Überlastung, falscher Montage oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen, ist ausgeschlossen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG Tel. + 49 7361 504-0.

**Installationshinweise:**

Bei der Wandmontage der Vorrüstsets ist die generelle Eignung der Wand sicherzustellen. Diese muss im Bereich der Befestigungen plan (keine vorstehenden Fugen, kein Fliesenversatz) und Tragfähig sein. Verwenden Sie ausschließlich vom Dübelhersteller, für diesen Zweck zugelassenes Befestigungsmaterial.

**Wartungshinweise:**

Erlau Vorrüstsets sind bis zum ersten Gebrauch wartungsfrei. Nach der ersten Anbringung und Benutzung von Duschsitzen oder Stützgriffen sind die Wandverschraubungen monatlich von qualifiziertem Fachpersonal auf festen Sitz zu prüfen. Mängeln (z. B. gelockerte Schrauben) sind zu beseitigen.

**Indikationsangaben:**

Erschwerte Nutzung der Toilette oder Dusche durch beeinträchtigte Stütz- und Rückenmuskulatur im Bereich des unteren Rückens, der LWS und/oder des Rumpfes.

**Kontraindikationen:**

Keine.

**Entsorgungshinweise:**

Für die Entsorgung von Produkt und Verpackung sind die jeweiligen regionalen und nationalen Vorschriften zu beachten.

**Pflegehinweise:**

Erlau Produkte verwenden im wesentlichen folgende Oberflächenmaterialien:

- Pulverlacke
- Chrom-Nickel
- Eloxiertes Aluminium
- Kunststoffe

Verwenden Sie zur Reinigung der Oberflächen ein sauberes feuchtes Tuch aus Viskose oder Mischgewebe. Sollten Sie auf den Einsatz von Reinigungsmitteln nicht verzichten wollen, so verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel mit einem PH Wert zwischen 5 und 9. Geeignete Reinigungsmittel verwenden Wirkstoffe wie Phosphate, Seifen oder Tenside. Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis können ebenfalls verwendet werden. Testen Sie im Zweifelsfall das Reinigungsmittel an einer unauffälligen Stelle. Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel die z.B. Salzsäure, Essigsäure oder Ameisensäure enthalten. Verwenden Sie keine laugenhaltigen Reinigungsmittel wie Fußbodenreiniger, Industriereiniger oder Reiniger die Natriumhydroxid enthalten. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Aceton, Nitroverdünnung oder Waschbenzin. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Scheuerbürsten. Ältere Mikrofasertücher können durch anhaftenden Schmutz und Reinigungsmittelrückstände Kratzer verursachen und sind daher nur bedingt zu empfehlen. Entfernen Sie anhaftende Rückstände von Reinigungsmitteln oder Körperpflegeprodukten frühzeitig. An bereits beschädigten Oberflächen, kann es durch Einwirkung jeglicher Art von Reinigungsmitteln zu einer Erweiterung des Schadens kommen. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittelherstellers. Geeignete Reinigungsmittel sind z.B. T560 Vario Clean Neutraler Schonreiniger, G481 Blitz Citro Neutraler Alkoholreiniger, D444 Budenat Rapid Schnelldesinfektionsmittel, D447 Budenat LM Neutrales Flächendesinfektionsmittel, P319 Planta San Intense Sanitärunterhaltsreiniger auf Basis von Methansulfonsäure, T464 Bucasan Trendy Sanitärunterhaltsreiniger auf Basis von Amidosulfonsäure oder G454 Bucasan Sanibreeze Sanitärunterhaltsreiniger auf Basis von Zitronensäure. Informationen zur deren Anwendung erhalten Sie von der Firma Buzil ([www.buzil.com](http://www.buzil.com)) / Hotline: +49 (0) 8331 930-730).

Eine Gewährleistung für Schäden die aus unsachgemäßer Reinigung hervorgegangen sind ist ausgeschlossen. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG Tel. + 49 7361 504-0.



